



Fleet Manager B2B

Outils de suivi des lunettes connectées

Septembre 2021



1. Rappel du fonctionnement des lunettes
2. Objectifs du Tableau de bord
3. Présentation générale
 - Tableau de bord
 - Page Utilisateur
 - Page Configuration Alertes
4. Contact






1. Rappel du fonctionnement des lunettes

Les **lunettes connectées** Elcie Healthy ont été conçues pour **veiller sur la sécurité des conducteurs** !

Équipées d'une quinzaine de capteurs, les lunettes intelligentes collectent et mesurent en permanence des variables physiques, physiologiques et environnementales pour aider à prévenir les risques d'endormissement au volant.

En cas de détection de prémices l'endormissement, **le conducteur est alerté par un signal sonore et lumineux** depuis les lunettes.

Les lunettes sont associées à l'application mobile Driver by Elcie Healthy, ce qui permet également de recevoir une **notification** sur son smartphone, tout comme les contacts que le conducteur aura préalablement enregistrés depuis l'application.

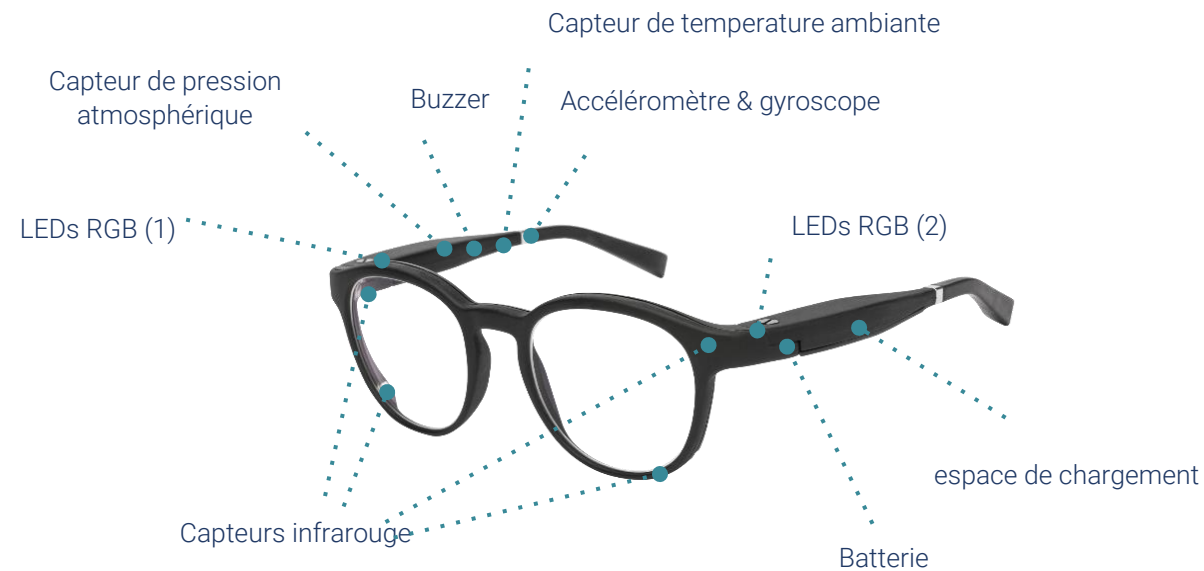



2. Objectifs du Tableau de bord

Les informations remontées par les lunettes connectées sont affichées sur une interface de gestion, ce qui permet en tant que Gestionnaire de flotte de **suivre les données avec une vue globale sur son groupe, ou par utilisateur.**

Les informations sont délivrées **en temps réel, ou sur une période déterminée.**

L'outil permet de :


- Consulter globalement les **principaux indicateurs des utilisateurs de son groupe**
- Restez informés en **détail sur tous les trajets par utilisateur**, avec visualisation sur une map
- Configurer la réception des **alertes SMS et/ou Email en cas de niveaux 4 ou 5** de l'un des utilisateurs de son groupe

L'outil est accessible en Français et en Anglais.

**Équipez vos collaborateurs
Et restez informés grâce au Fleet Manager !**



3. Présentation générale

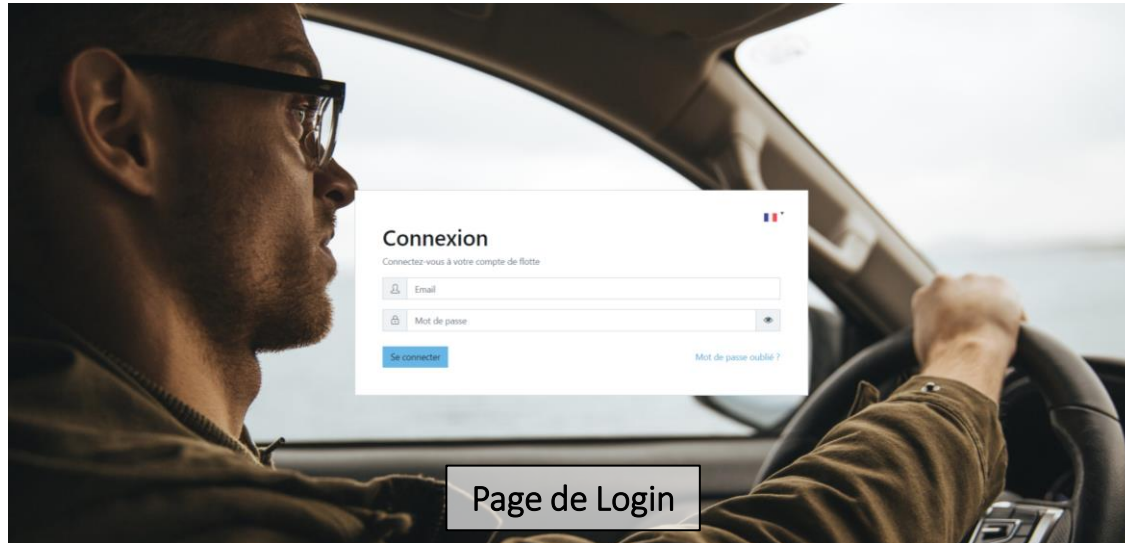

Page de Login



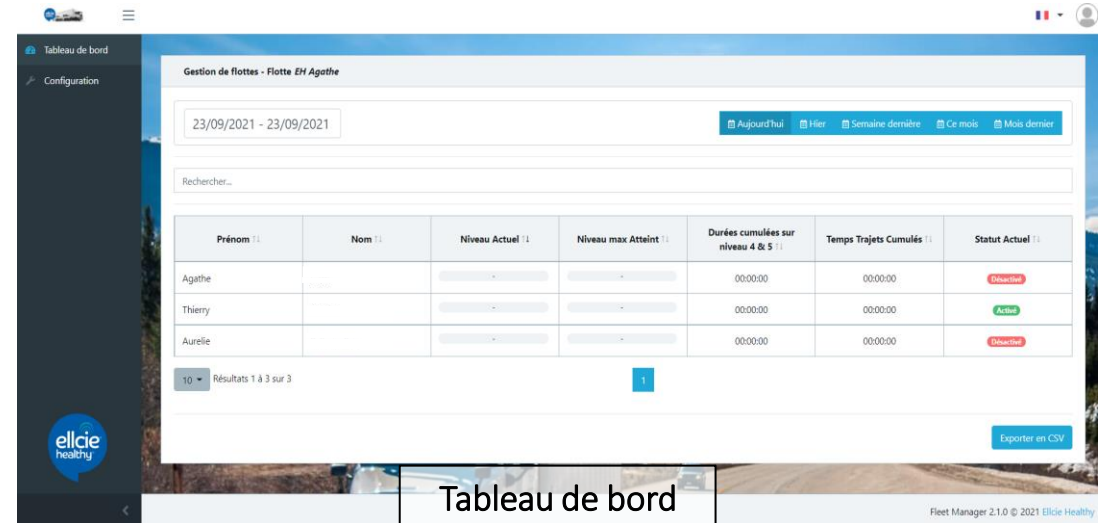


Tableau de bord

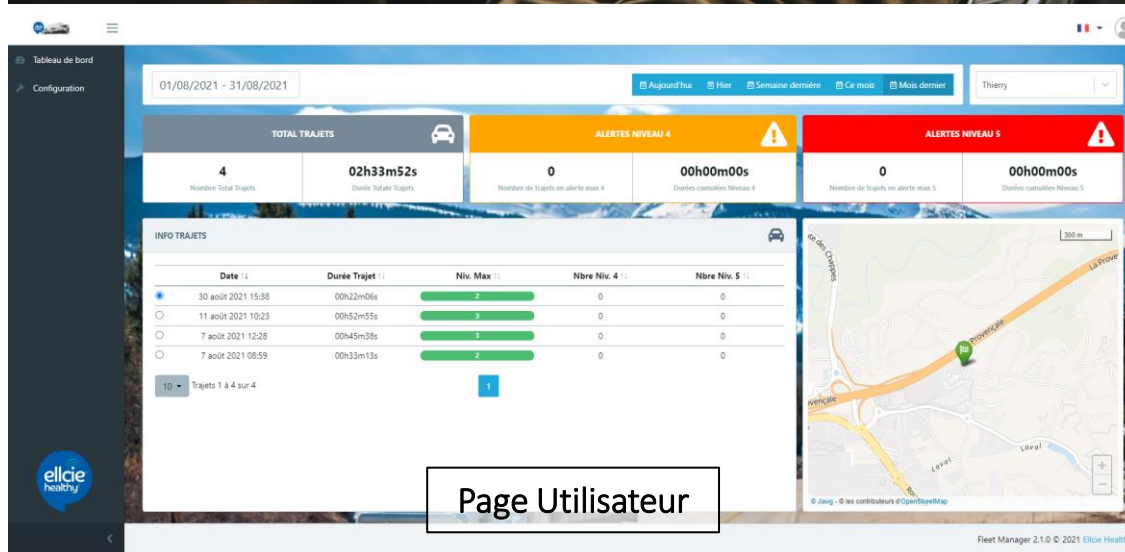


Page Utilisateur

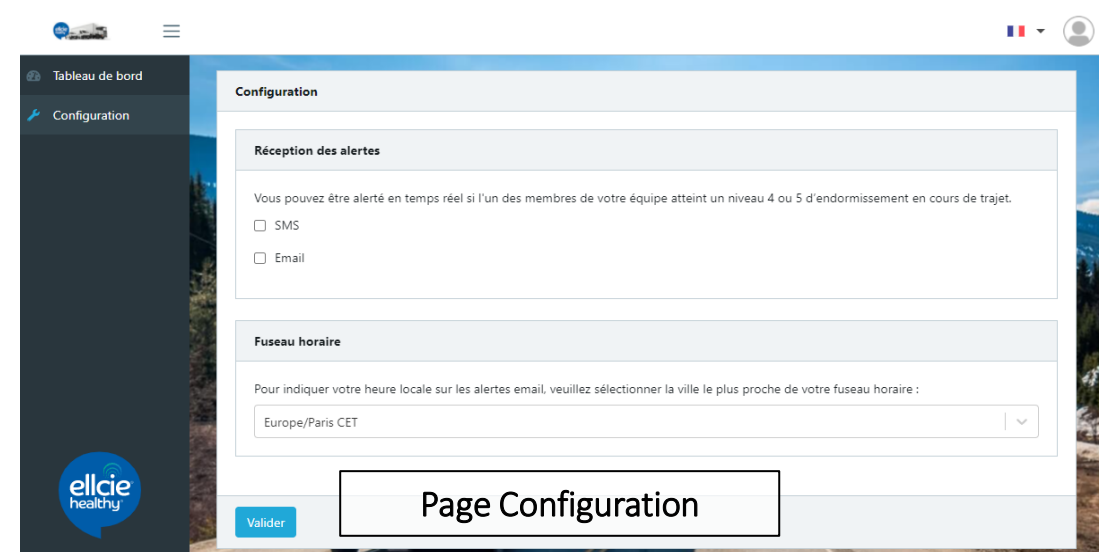

Page Configuration

3. Présentation générale

Tableau de bord

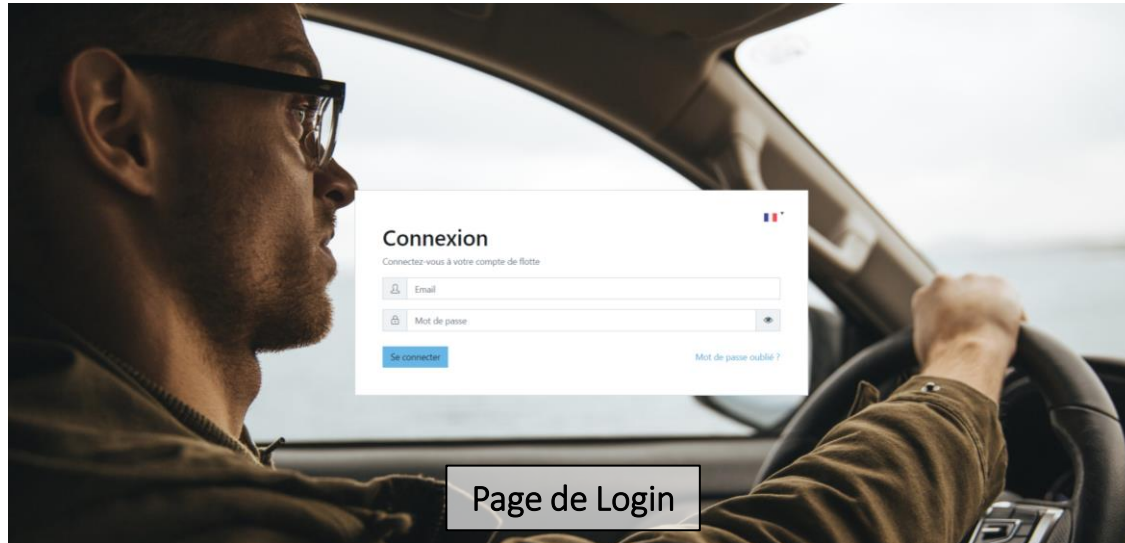


Page de Login


Indicateurs des utilisateurs du groupe :

- le niveau actuel des conducteurs
- le niveau max atteint sur la période sélectionnée
- les durées cumulées sur les niveaux 4 & 5
- les temps de trajets cumulés
- le statut actuel des lunettes

Tableau de bord

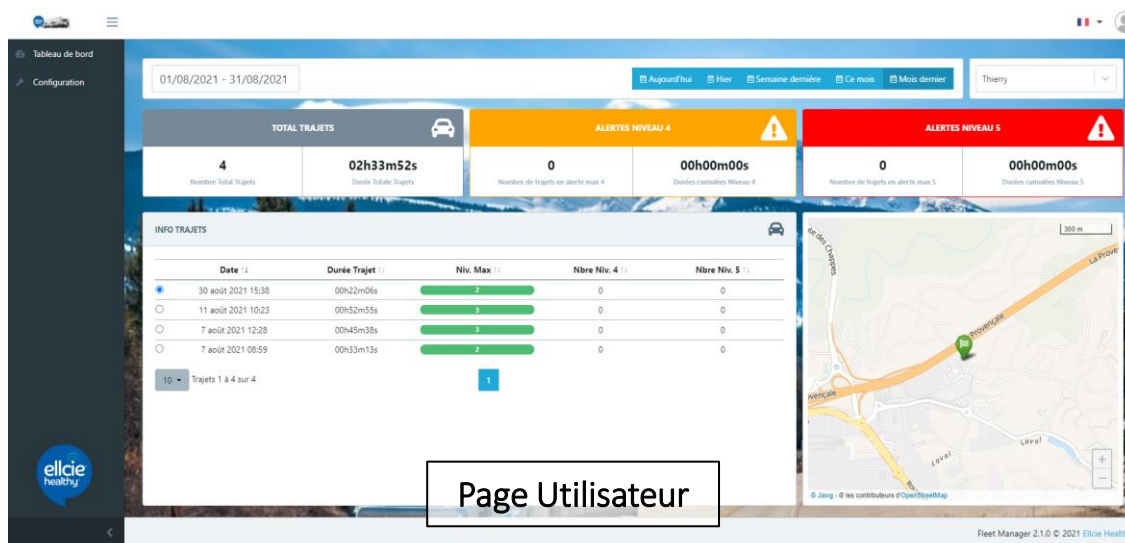


Page Utilisateur

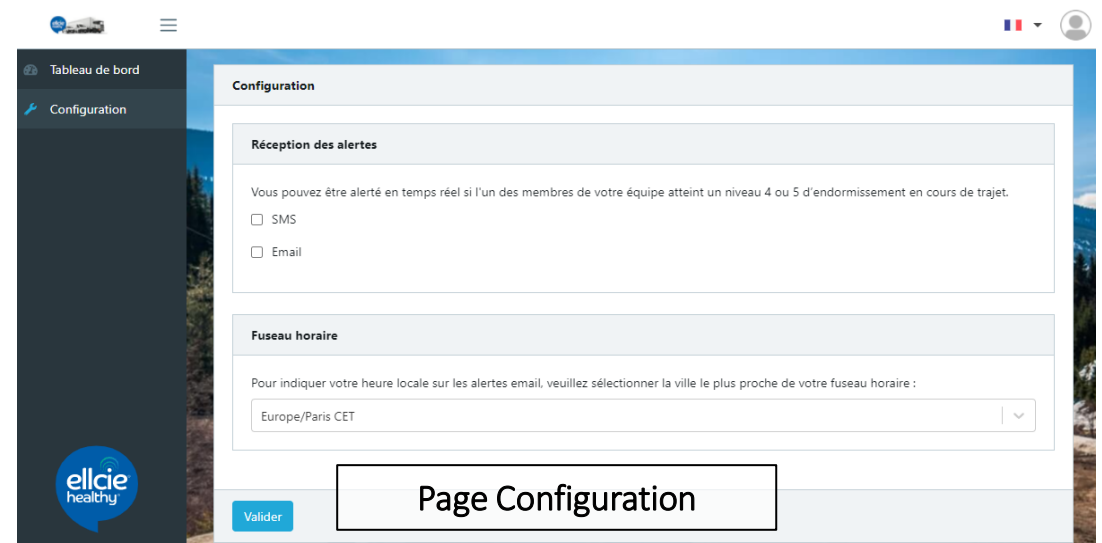

Page Configuration

3. Présentation générale

Page Utilisateur

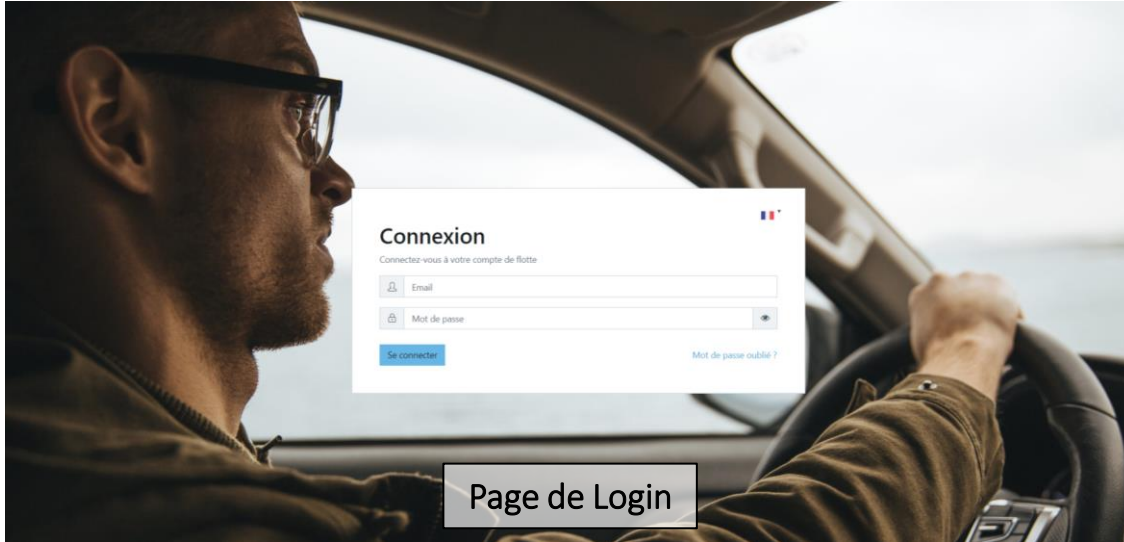

Page de Login


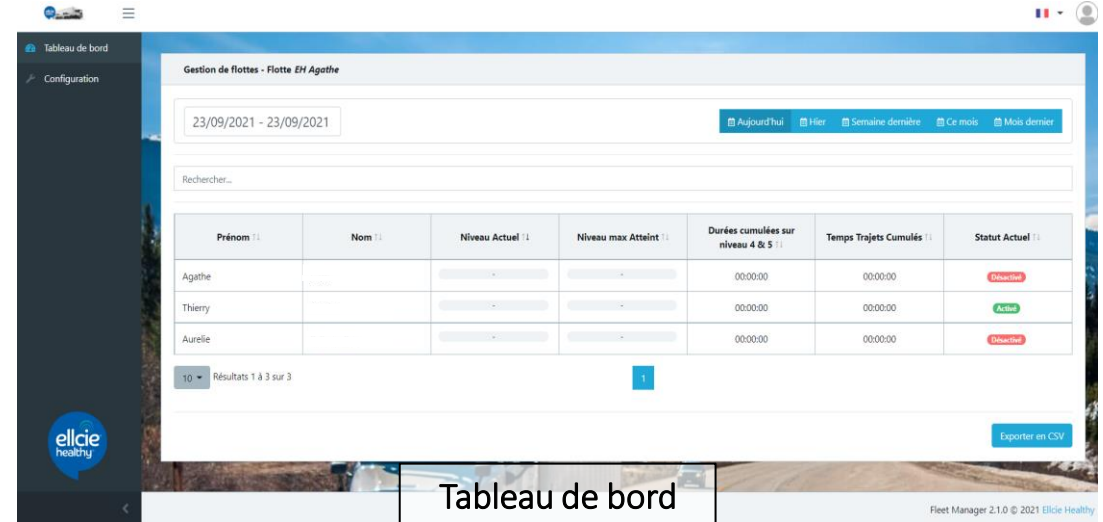


Tableau de bord

Détail des trajets par utilisateur

- le nombre et la durée des trajets effectués
- le nombre et la durée des alertes niveau 4 reçues
- le nombre et la durée des alertes niveau 5 reçues
- le détail de chacun des trajets avec visualisation sur la Map

Page Utilisateur

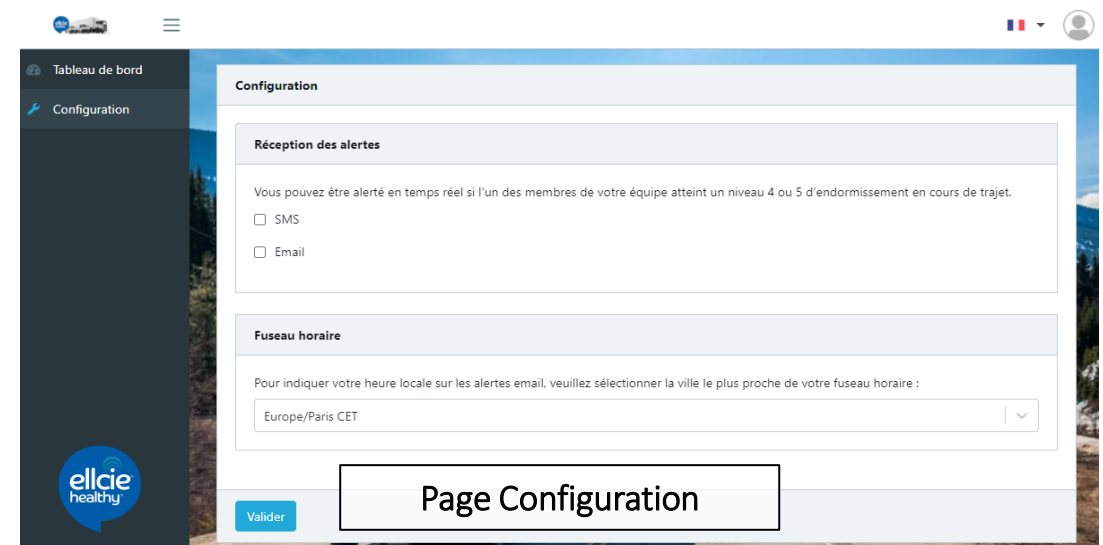


Page Configuration



3. Présentation générale

Page Configuration

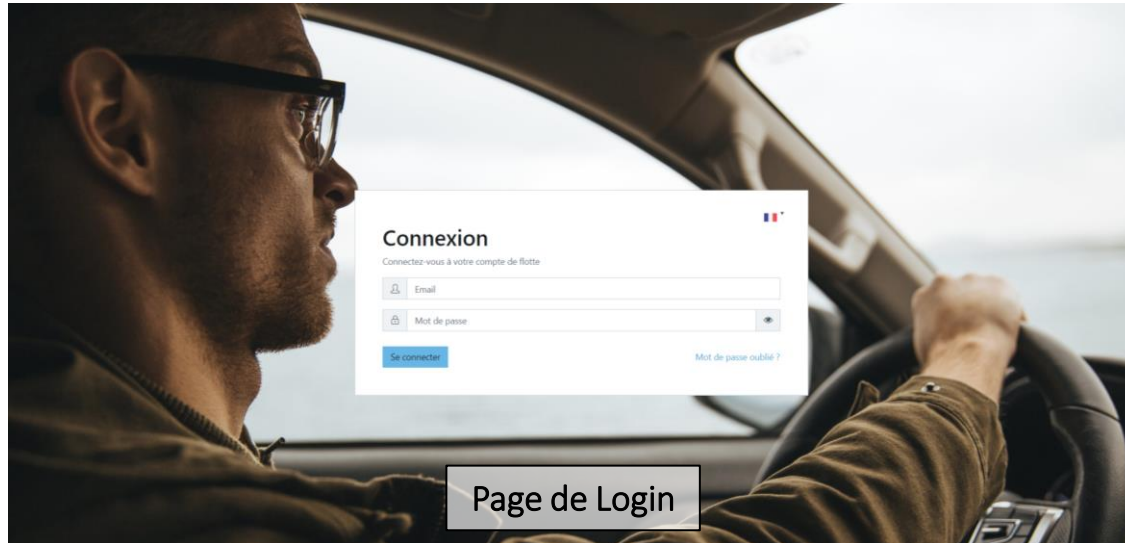

Page de Login


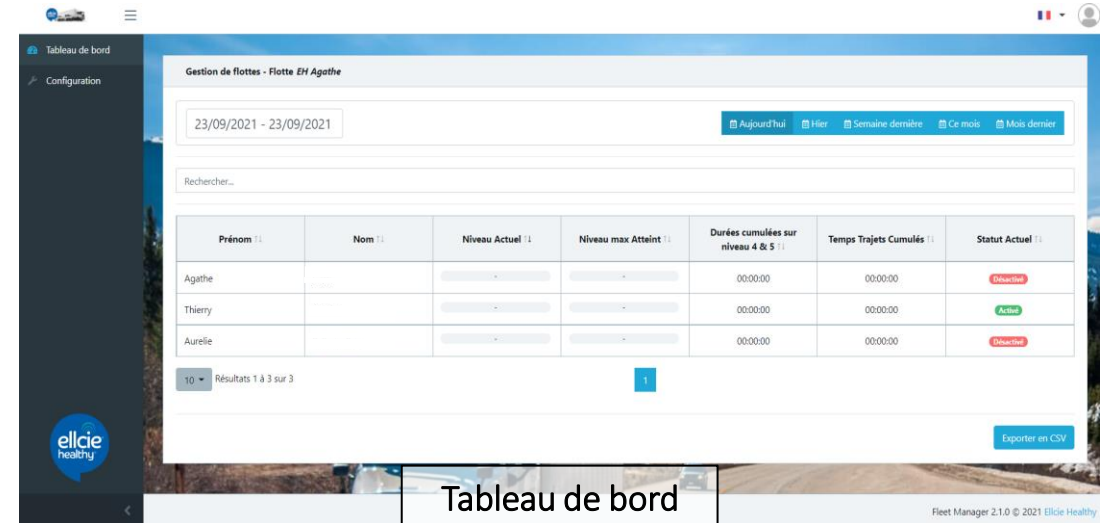


Tableau de bord

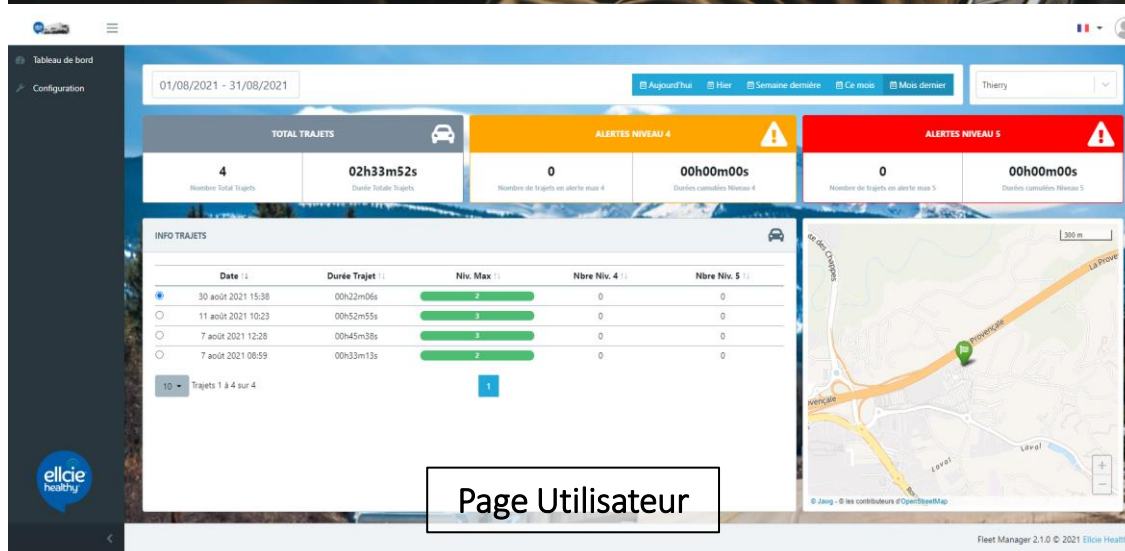

Page Utilisateur

Le menu Configuration.

Vous pouvez configurer le type d'alerte (SMS et/ou email) que vous souhaitez recevoir à chaque fois que l'un des utilisateurs de votre groupe atteint un niveau critique d'endormissement (niveau 4 ou 5).

Vous pouvez également modifier votre fuseau horaire afin que l'heure indiqué dans les alertes correspondent bien à l'heure locale.

Page Configuration



4. Vos contacts

Thierry Muela

Responsable Commercial B2B

Mail : thierry.muela@elcie-healthy.com

Mobile: 33 (0)668 654 590

Philippe Peyrard

CEO

Mail : philippe.peyrard@elcie-healthy.com

Mobile: 33 (0)678068162

Elcie Healthy

670 chemin du Valbosquet – Villa B

06600 Antibes

www.elcie-healthy.com